



Ambu[®] Hygienesystem

Sicherheit für Ihr BLS-Training

Vertrauen Sie dem Ambu[®] Hygienesystem



Ambu Hygienesystem

Das Ambu Hygienesystem für die **Ambu® BLS-Trainingsgeräte** bietet Ihnen und den Teilnehmern der Reanimationskurse einen adäquaten Schutz vor Kreuzkontaminationen.



Die Vorteile

- ✓ Pro Teilnehmer eine Gesichtsmaske und ein Einweg-Luftbeutel
- ✓ Schützt zuverlässig vor Kreuzkontamination zwischen den Kursteilnehmern
- ✓ Die Gesichtsmasken sind waschbar und desinfizierbar
- ✓ Die Einweg-Luftbeutel werden nach dem Kurs entsorgt
- ✓ Keine aufwendige Innenreinigung des Trainingsgerätes notwendig
- ✓ Bei allen Ambu BLS-Trainingsgeräten verfügbar

Wie funktioniert das Ambu Hygienesystem?

1. Der Einweg-Luftbeutel wird im Kopfinneren des Trainingsgerätes platziert (siehe Abbildung)
2. Darüber wird die Gesichtsmaske angebracht, sodass sie korrekt abdichtet
3. Die Beatmung kann nun durch Mund oder Nase erfolgen
4. Sobald die Teilnehmer wechseln, werden auch Einweg-Luftbeutel und Gesichtsmaske getauscht



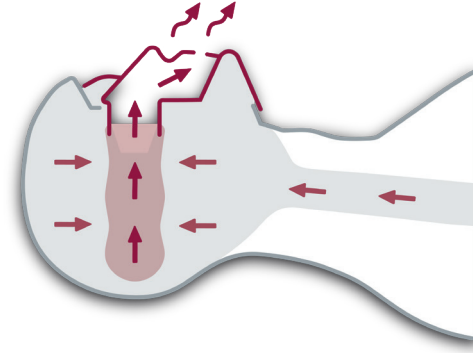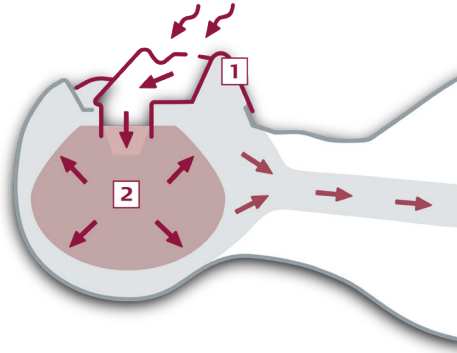

Während der Beatmung durch Mund oder Nase der Gesichtsmaske (1) dehnt sich der Einweg-Luftbeutel durch die einströmende Luft im Kopfinneren aus (2) und verdrängt dort die Luft in die Lunge des Trainingsgerätes.

Nach der Beatmung strömt die Luft aus der Lunge zurück und bewirkt, dass der Einweg-Luftbeutel zusammengedrückt wird. Die Luft entweicht aus Nase und Mund der Gesichtsmaske.

Der Unterschied zu anderen Systemen

Bei Einlungensystemen erhält jeder Teilnehmer lediglich eine eigene Gesichtsmaske. Der Lungenbeutel des Trainingsgerätes hingegen wird nur einmal pro Kurs und nicht pro Teilnehmer gewechselt. Dies kann bei der Rückatmung zu Kreuzkontaminationen führen, wenn sich in dem Lungenbeutel Keime angesammelt haben.

Bei dem **Ambu Hygienesystem** hingegen werden Gesichtsmaske und Einweg-Luftbeutel je Teilnehmer gewechselt und bietet daher optimalen Schutz für die Teilnehmer. Der Lungenbeutel im Torso des Trainingsgerätes bleibt keimfrei und muss nicht gewechselt werden.

Ambu Produkte mit Hygienesystem

- ✓ AmbuMan Instrument / Wireless
- ✓ AmbuMan Defib
- ✓ AmbuMan Basic
- ✓ AmbuMan School
- ✓ Ambu SAM
- ✓ Ambu Junior
- ✓ Ambu Baby





Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Artikel
Für AmbuMan Instrument / Wireless, AmbuMan Defib, AmbuMan Basic und Ambu SAM	
234 000 703	Ambu Gesichtsmaske (5 Stück)
234 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)
Für AmbuMan School	
268 000 571	Ambu Gesichtsmaske (10 Stück)
268 000 572	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)
Für Ambu Junior	
100-2082U	Ambu Mund-Nase-Stücke (10 Stück)
282 010 501	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)
282 010 502	Ambu Abdichtungsringe (10 Stück)
Für Ambu Baby	
256 000 703	Ambu Gesichtsmaske (5 Stück)
256 000 702	Ambu Einweg-Luftbeutel (100 Stück)